

TPABHETE/ODTRHNITE

**Εφαρμογέας με 6 γρ.
αιμοστατικούς κόκκους**
*Aplikátor s hemostatickými
granulami, 6 g*

Cieľová skupina pacientov: Dospelí a deti, s výnimkou novorodencov a dojčiat.

CE
2797



STERILE R



MD

CELOX

Για πληγές ευρύτερης επιφάνειας, προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε τους αιμοστατικούς κόκκους CELOX αντί για τον εφαρμογέα CELOX-A
Pri väčších plošných poraneniach použite hemostatické granuly CELOX namiesto aplikátora CELOX-A

TRABHETE/ODTRHNIT

(sk) Návod na použitie:

- 1 Nasadíte rukavice (ak sú k dispozícii).
- 2 Roztrhnete balenie CELOX-A, podržte aplikátor v otvorenom balení a vyberte piest bez toho, aby ste sa dotkli špičky.
- 3 Zatiaľ čo aplikátor stále držíte v balení, odstráňte koncový uzáver z hornej časti aplikátora pomocou palcového ťahu. Piest vložte do valca aplikátora obsahujúceho granulý CELOX.
- 4 Aplikátor úplne vyberte z vrecka pomocou ťahútek na prsty (v tvare T). Tesne pred použitím uchopte a podržte modrý plastový kryt z konca aplikátora.
- 5 Vložte aplikátor s pripojenými piestom čo najhlbšie do rany.
- 6 Pomaly tlačte piest, a zároveň vyťahujte aplikátor z rany. V závislosti od veľkosti rany môže byť potrebných viac aplikátorov.
- 7 Ranu zakryte a vyplňte gázou, aby siahala nad úroveň kože a po dobu piatich minút silno zatlačte.
- 8 Ak krvácanie pretrváva alebo sa znovu spustí, vyvíjajte priamy tlak ďalších 5 minút. Na ranu alebo iné rany vyžadujúce núdzovú hemostázu sa môžu použiť ďalšie aplikátory alebo hemostatické granulý CELOX.
- 9 Na udržanie tlaku ranu oviňte a obväz bezpečne uviažte.
- 10 Čo najskôr prepravte pacienta do zdravotníckeho zariadenia.
- 11 Prázdny obal ukážte zdravotníckemu personálu v zariadení.
- 12 Použitý alebo čiastočne použitý aplikátor alebo granuly zlikvidujte podľa miestnych štandardných protokolov pre biologické odpady.

ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Απαράρτησε με φυσικό τρόπο τυχόν μη χρησιμοποιούμενους κώδικες και την παρέρχουσα κρούση από την πλήρη διανομή το τράφιμα αν χρειάζεται.
2. Πίναξε σχολιασμό την πλήρη και τυχόν περβαλλόμενα στο με αποθεματικό αλυστικό διάγραμμα για να απαράρτησε τυχόν υπολείμματα.
3. Εφαρμόστε τη συντηρητική διαδικασία καθαρισμού.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχει απαράρτησε αποδοίσιμους προϊόν από την πλήρη πριν από την έναρξη της διερεύνησης.
5. Απαράρτησε την παρέρχουσα κρούση και τα υπολείμματα που έχετε απορρίψει, σύμφωνα με τα τοπικά τυπικά πρωτοκόλλα για βιολογικά απόβλητα.

Διάρκεια χρήσης: Το ιατροτεχνολογικό προϊόν και τα υπολείμματα θα πρέπει να απορρίπτονται από την πλήρη εντός 24 ωρών από την εφαρμογή.

Προϊόντα και προφύλαξη: Μόνο για εξωτερική χρήση. Τα προϊόντα Medtrade S.p.A. περιλαμβάνουν φάρμακα που έχουν ως κύριο σκοπό να αποφευχθεί τυχόν διαρροή. Τυχόν απόρριψη σταθραφής ενέχει πιθανό κίνδυνο μόλυνσης. Να μην επαφιστοιχίζονται. Να αποφευχθεί η εισπνοή. Να μην εφαρμόζεται μόνο από τα χέρια. Εάν εμφανιστεί ερυθρότητα στα μάτια, ξεπλύνει με νερό επί 5 λεπτά. Να διατηρείται μακριά από τα παιδιά. Το μπεκ καπάκι περιέχει φθοριούχο στέρεο. Η ανακυκλοφορία του θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβλαβή και μόνιμη απώλωση του προϊόντος. Μην αφήνετε τα προϊόντα να έρθουν σε επαφή με το νερό. Μολύνει με αλληλεπιδράσεις στον εγκέφαλο αυθεντικούς ενέστες. Αδειάζει υπάρχουν διαβήματα στον χώρο της Medtrade Products Ltd.

Αντενδείξεις: Μην το χρησιμοποιείτε σε κοιλιακές πληγές και πληγές που δεν μπορούν να υποστούν πίεση. Μην στεγνώνετε το προϊόν σε κοιλότητες του σώματος. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν προορίζεται για χειρουργική χρήση.

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκετασμένος ο χαρτάρις ή/και ο ασθενής.

Η περιέργη των χαρακτηριστικών ασφάλειας και των κλινικών επιδόσεων (SSCF) για το ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Euamed), όπου συνδέεται με τον βασικό αναγνωριστικό κωδικό UDI-DI. Ο ιστότοπος της Euamed είναι <http://ec.europa.eu/tools/euamed> και ο βασικός αναγνωριστικός κωδικός UDI-DI είναι 506206638P0993020037.



Medtrade Products Ltd, Electra House,
Crewe Business Park, Crewe, CW1 6GL, UK
www.celoxmedical.com



MedEnvy, Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123, 2595 AM The Hague,
The Netherlands

FG08832161
Αναφ. γραφικών στοιχείων / Ref. ilustrácie:
MTP-25-2884

Ημερομηνία έκδοσης / *Datum wydania*: 15 Ιαν. 2025 / 15. Jan 2025

